



# FLU-STONE

YESO ZÓCALO / YESOS



## MODELOS PROFESIONALES CON COLORES INTENSOS

- YESO AUTONIVELANTE PARA LA FORMACIÓN DE ZÓCALOS COMPACTOS
- EXPANSIÓN ADECUADA PARA LA FRICCIÓN DE PINES
- FLUYE RÁPIDAMENTE. LIBRE DE BURBUJAS

YESO TIPO 4 • ISO 6873

# FLU-STONE

## YESO FLUIDO AUTONIVELANTE ESPECIAL PARA ZÓCALOS.

### VENTAJAS

- Superficie compacta y lisa
- Fácil separación de los muñones
- Recomendado para sistemas de pines
- Libre de burbujas

### MODO DE EMPLEO

Proporción polvo/agua:	100 g/ 24 ml
Temperatura de trabajo:	20-23°C
Mezclado: Mecánico bajo vacío:	30 sec.
Manual:	60 sec.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tiempo de trabajo:	6 min.
Fraguado Inicial: (Test Vicat según ISO 6873)	8 min.
Fraguado Final: (Test Vicat según ISO 6873)	11 min.
Expansión de fraguado (2 h.):	0.05 %
Resistencia a la compresión (1 h.):	> 40 MPa

### FORMATO DE VENTA




#### Eco-Pack 6 Kg (3 x 2000 g)

Terra	Azul	Azul Intenso	Indian red
1130-067	1130-061	1130-068	1130-069

#### Test pack 2 kg (1 x 2000 g)

Terra	Azul	Azul Intenso	Indian red
1130-K67	1130-K61	1130-K68	1130-K69

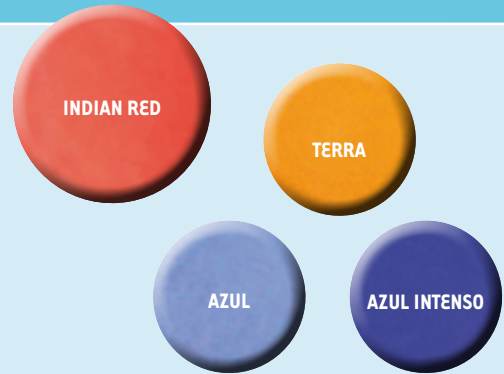

### PRODUCTOS ASOCIADOS

**KIMBERLIT** Yeso natural extraduro de alta densidad para modelos maestros.



**TENSIO-SIL** Reductor de tensiones para alginato y silicona. Modelos sin poros.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)