



GINGIPRO-SIL

Descripción

Máscara gingival para la reproducción de los contornos de los tejidos blandos.

Utilización

GINGIPRO-SIL es una máscara gingival basada en una silicona de poliadición suministrada en cartuchos.

GINGIPRO-SIL proporciona al profesional los datos esenciales para la determinación del contorno cervical y de los límites extremos para la preparación de prótesis fijas.

Ventajas

- Se puede aplicar directamente sobre el modelo sin aparición de burbujas.
- Exacto y dimensionalmente estable. Puede ser eliminada fácilmente del modelo de yeso sin roturas.
- Se puede localizar y prevenir presiones en la encía provenientes de la prótesis fija. Por tanto previene de posibles inflamaciones del periodonto.

GINGIPRO-SIL Rígida

- Dureza óptima que permite el fresado de los bordes en el acabado de los modelos
- Fácilmente fresable
- Definición precisa de los bordes

GINGIPRO-SIL Elástica

- Alto módulo elástico para facilitar la extracción del modelo de yeso sin desgarros
- Altamente estética por su semitransparencia
- Posibilidad de uso tanto con la técnica directa como con la indirecta

Modo de empleo

Cargar el cartucho en la pistola dispensadora. Quitar el tampón e insertar la cánula de mezcla.

Aplique lentamente el producto asegurándose que los dos componentes fluyen uniformemente.

Prepare el modelo de yeso como habitualmente.

Realice una impresión de la parte relevante de la encía con una silicona de condensación como el LABOSIL 80 o 90 .

Una vez fraguada la silicona, extraer la impresión que servirá de molde juntamente con el modelo de yeso que ha sido recortado.

Al eliminar los contornos gingivales queda un espacio que ha de ser rellenado con la silicona GINGIPRO-SIL.

Realizar dos pequeños orificios con una fresa en el molde de silicona para poder introducir la silicona GINGIPRO-SIL por uno de ellos. El otro actuará de canal de salida de aire.

Con la ayuda de la punta aplicadora, introducir la silicona GINGIPRO-SIL hasta que aparezca por el orificio de salida.

Para una exacta y fácil separación entre la máscara gingival y el molde de silicona, el molde de silicona debe ser tratado previamente con el Separador suministrado aplicando una fina capa con el pincel.

Tiempo de trabajo: **1'30''**

Tiempo de reticulación: **7 – 8 minutos**

(Valores obtenidos con una temperatura ambiente de 23 °C)

Una vez retirado el molde de silicona, la máscara gingival debe quedar en el modelo recortado, sirviendo de referencia para el margen gingival.

Atención:

No use guantes de látex ya que pueden interferir en la reticulación del material

Almacene los cartuchos utilizados con la cánula de mezcla. No reutilice los tapones ya que puede provocar contaminación cruzada de los componentes y por lo tanto una reticulación prematura

Almacenaje y caducidad

Almacenar a temperaturas inferiores a 25 °C

No utilizar el producto después de su fecha de caducidad marcada en el envase.

Presentación

Kit con 2 cartuchos 50 ml + 12 cánulas mezcla + 1 separador y pincel + 12 puntas intra-orales :

Rígida	Elástica
5072-K10	5072-K11

Accesorios

5073-CA4	Cánulas de mezcla (48 un)
5073-PA4	Puntas intra-orales (48 un)
5073-000	Pistola dispensadora 1:1 / 2:1
5072-510	Separador 10 ml

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.

Para más información, véase la ficha de datos de seguridad existente para los productos GINGIPRO-SIL. Pídaselas a su distribuidor habitual.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com