

QUICK-ROCK



ARTIKULATION / GIPSE



EXPANSION
0.01%



SCHNELLE AUSHÄRTUNG UND SEHR GERINGE EXPANSION

- EXTREM GERINGE EXPANSION
- HÄRTE ENTSPRECHEND DEN ANFORDERUNGEN
- HAFTWIRKUNG

GIPS TYP 2 : KLASSE 1 • ISO 6873

QUICK-ROCK

SPEZIELLER GIPS FÜR DIE GELENKHERSTELLUNG.

VORTEILE

- **Schnelle Aushärtung und sehr geringe Expansion.**
- Extrem geringe Expansion.
- Härte entsprechend den Anforderungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konsistenz:	100 g/ 30 ml
Arbeitstemperatur:	20-23°C
Mechanische Vakuummischung:	20 sec.
Manuelle Mischung:	30 sec.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungszeit:	1,5 min.
Anfangsbindezeit:	2 min.
(Test Vicat ISO 6873)	
Abbindungszeit:	3 min.
(Test Vicat ISO 6873)	
Abbindeexpansion (2 h.):	0.01 %
Druckfestigkeit (1 h.):	25 N / mm²

VERKAUFSFORMAT

WEISS

1160-100	Eco-pack (5 x 2 kg)	10 kg
1160-150	Eimer	15 kg
1160-K20	Test pack (1 x 2 kg)	2 g

VERWANDTE PRODUKTE

KIMBERLIT

Natürlicher Gips, extrahart, mit hoher Dichte.



ISOGIPS

GIPS-GIPS-TRENNER. EFFEKTIVE UND SCHNELLE TRENNUNG



LICHT ARTIKULATOR

Halb verstellbarer Artikulator ohne Gesichtsbogen. Hergestellt aus technischem Kunststoff.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com