



DISOL-GIPS

ZUBEHÖR / GIPSE



GIPS UND ALGINATLÖSEMITTEL



DISOL-GIPS WURDE EIGENS ENTWICKELT FÜR DIE ENTFERNUNG VON:

- GIPSRESTEN AUF SPATELN UND PROTHESEN INNERHALB WENIGER STUNDEN
- REINIGUNG VON ABFORMLÖFFELN

DISOL-GIPS

REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT FÜR GIPS UND ALGINAT.

VORTEILE

- Schnelle Reaktion: Blasenbildung
- Die Anwendung in Ultraschallbädern ist möglich, um die Wirkung zu beschleunigen
- Flüssiges Format, gebrauchsfertig
- Beschädigt nicht die Prothesen

GEBRAUCHSANWEISUNG

Den zu reinigenden Gegenstand in ein mit **DISOL-GIPS** gefülltes Glas- oder resistentes Plastikgefäß geben.

Zur Entfernung von Gipsresten das Produkt einige Stunden einwirken lassen, zur Entfernung von Alginatresten vorzugsweise während der ganzen Nacht. Mit Wasser abspülen.

Die Flüssigkeit **DISOL-GIPS** kann zur Reinigung von Plastik- und Metalllöffeln verwendet werden, jedoch nicht für solche aus Aluminium. Ebenfalls für die Reinigung von Mischbechern und Spateln geeignet.

Entfernt den Gips aus Kunststoffprothesen selbst an schwer zugänglichen Stellen, ohne die Farbe der Prothese zu beeinträchtigen.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT


Unter Wahrung der Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit des Produktes 3 Jahre.

VERKAUFSFORMAT

1191-300 DISOL-GIPS 3.000 ml
• Gebrauchsfertig



ELIMINIERUNG
VON GIPS IN
PROTHESEN.

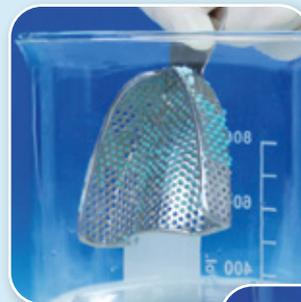

REINIGUNG VON
ABFORMLÖFFELN
UND RESTEN VON
ALGINAT.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com