



DISOL-GIPS

COMPLEMENTOS / **YESOS**



POTENTE ELIMINADOR DE YESO Y ALGINATO



DISOL-GIPS HA SIDO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ELIMINAR:

- RESTOS DE YESO EN ESPÁTULAS Y DENTADURAS EN POCAS HORAS
- LA LIMPIEZA DE CUBETAS DE IMPRESIÓN



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

DISOL-GIPS

LÍQUIDO ELIMINADOR DE YESO Y ALGINATO.

VENTAJAS

- Reacción rápida: formación de burbujas
- Se puede utilizar en baños de ultrasonidos para acelerar su acción
- Formato en líquido, listo para el uso
- No daña las prótesis

MODO DE EMPLEO

Introducir el objeto a limpiar en un recipiente de vidrio o plástico resistente lleno de **DISOL-GIPS**.

Para la eliminación de restos de yeso, dejar actuar el producto unas horas y para la eliminación de restos de alginato, preferiblemente toda la noche. Aclarar con agua.

El líquido de **DISOL-GIPS** se puede utilizar para limpiar cubetas plásticas o metálicas excepto las de aluminio. También para la limpieza de tazas de mezcla y espátulas.

Elimina el yeso de las dentaduras acrílicas incluso de los espacios de difícil acceso sin afectar al color de la prótesis.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

La estabilidad del producto es de 3 años, respetándose las condiciones de almacenamiento.

FORMATO DE VENTA


1191-300 DISOL-GIPS

3.000 ml


- Listo para su uso



ELIMINACIÓN
DE YESO EN
DENTADURAS

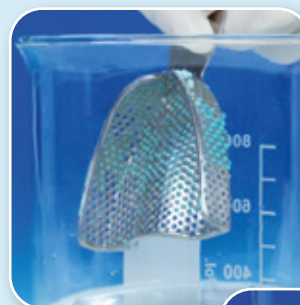

LIMPIEZA DE
CUBETAS Y
RESTOS DE
ALGINATO

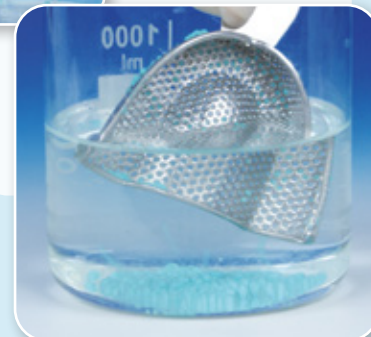

protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com