

DURGUIX



MODELLE & ANTAGONISTEN / GIPSE



HOCHWERTIGER QUALITÄTSGIPS

- ALLZWECK-GIPS FÜR DAS LABOR
- GEEIGNET FÜR DIE HERSTELLUNG VON MODELLEN IN DER KUNSTSTOFF- UND PROTHESENGERÜSTTECHNIK, VON ANTAGONISTEN UND FÜR DAS FORMEN VON ABFORMLÖFFELN

GIPS TYP 3 • ISO 6873

DURGUIX

VERBESSERTER HARTGIPS TYP 3.

VORTEILE

- **Thixotrope** Konsistenz
- Optimale Definition aller Details
- Sehr glatte und harte Oberflächen

GEBRAUCHSANWEISUNG

Verhältnis Pulver/Wasser:	100 g / 28-30 ml
Arbeitstemperatur:	20-23°C
Mischen: Mechanisch unter Vakuum:	30 Sek.
Manuell:	60 Sek.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungszeit:	5 Min.
Anfangsbindezeit:	9 Min. (Vicat-Verfahren gemäß ISO 6873)
Endbindezeit:	12 Min. (Vicat-Verfahren gemäß ISO 6873)
Abbindezeit:	30 Min.
Abbindeexpansion (2 Std.):	0,16 %
Druckfestigkeit (1 Std.):	32 N/mm ²

VERKAUFSFORMAT



Eimer 20 kg

Rosa	Gelb	Blau
1140-200	1140-201	1140-202

Sack 25 kg

Rosa	Gelb	Blau
1140-260	1140-261	1140-262

Karton 25 kg

Rosa	Gelb	Blau
1140-280	1140-281	1140-282



VERWANDTE PRODUKTE


TENSIO-SIL

Spannungsreduzierer für Alginat und Silikon. Modelle ohne Poren.



QUICK-ROCK

Spezieller Gips für die Artikulation.

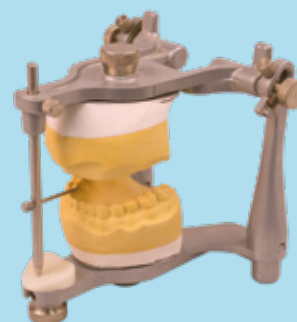

protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com