

DURGUIX



MODELLI E ANTAGONISTI / GESSI



GESSO DI ALTA QUALITÀ

- GESSO PER USO GENERALE DI LABORATORIO
- INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI CON TECNICA ACRILICA E SCHELETRICA, MODELLI ANTAGONISTI E PER LA CREAZIONE DI PORTAIMPRONTE

GESO DI TIPO 3 • ISO 6873



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

DURGUIX

GESSO PIETRA DURO MIGLIORATO TIPO 3.

VANTAGGI

- Consistenza **tissotropica**
- Ottima definizione dei dettagli
- Superfici molto lisce e dure

MODALITÀ D'USO

Proporzione polvere/acqua:	100 g / 28-30 ml
Temperatura di lavorazione:	20-23°C
Miscelazione: Meccanica sotto vuoto:	30 sec.
Manuale:	60 sec.

CARATTERISTICHE FISICHE

Tempo di lavorazione:	5 min.
Indurimento iniziale: (Test Vicat secondo ISO 6873)	9 min.
Indurimento finale: (Test Vicat secondo ISO 6873)	12 min.
Tempo di indurimento:	30 min.
Espansione durante l'indurimento (2 h.):	0,16%
Resistenza alla compressione (1 h.):	32 N / mm ²

FORMATO DI VENDITA



Contenitore 20 kg

Rosa	Giallo	Blu
1140-200	1140-201	1140-202

Sacco 25 kg

Rosa	Giallo	Blu
1140-260	1140-261	1140-262

Scatola 25 kg

Rosa	Giallo	Blu
1140-280	1140-281	1140-282



PRODOTTI ASSOCIATI

TENSIO-SIL

Riduttore di tensioni per alginato e silicone. Modelli senza porosità.



QUICK-ROCK

Gesso speciale per articolazione.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com