




FLU-STONE

PLÂTRES DE SOCLES / **PLÂTRE**

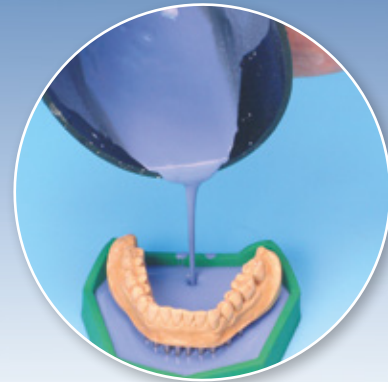

MAQUETTES PROFESSIONNELLES AVEC DES COULEURS INTENSES

- PLÂTRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR SOCLE
- SANS VIBRATION
- EXCELLENTE AISANCE. EXEMPT DE BULLES D'AIR

PLÂTRE TYPE 4 • ISO 6873

FLU-STONE

PLÂTRE À SOCLE DE CONSISTANCE FLUIDE.

AVANTAGES

- La surface du socle est remarquablement lisse et compacte
- Facile à séparer des moignons
- Conseillé pour tous systèmes de pins
- Sans bulles d'air

MODE D'EMPLOI

Dosage poudre / eau:	100 g. / 24 ml.
Température de travail:	20-23°C
Malaxage: Mécanique sous vide:	30 sec.
Manuel:	60 sec.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Temps de travail:	6 min.
Temps de prise: Début:	8 min.
(Según Test Vicat ISO 6873)	
Temps de prise: Finition:	11 min.
(Según Test Vicat ISO 6873)	
Taux d'expansion (2 h.):	0.05 %
Résistance à l'écrasement (1 h.):	> 40 MPa

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE



Eco-Pack 6 Kg (3 x 2000 g)

Terra	Bleu	Bleu Intense	Indian Red
1130-067	1130-061	1130-068	1130-069

Test pack 2 kg (1 x 2000 g)

Terra	Bleu	Bleu Intense	Indian Red
1130-K67	1130-K61	1130-K68	1130-K69



PRODUITS ASSOCIÉS

KIMBERLIT Plâtre naturel extra-dur de haute densité.



TENSIO-SIL Réducteur de tensions pour alginate et silicone. Modèles (plâtre ou revêtement) sans porosités.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com