

KIMBERLIT



STÜMPFE UND MASTER MODELLE / GIPSE



ZEIT IST GOLD: MODELLE IN 20 MINUTEN

- ERREICHEN SIE EINE HÖHERE PRODUKTIVITÄT BEI MAXIMALER QUALITÄT
- IDEAL FÜR FESTSITZENDE PROTHESEN, STÜMPFE UND MODELLE
- CAD/CAM GEEIGNET

GIPS TYP 4 • ISO 6873

KIMBERLIT

NATÜRLICHER GIPS MIT HOHER DICHTE.

VORTEILE

- **Präzise Entformung nach nur 20 Min.**
- Bruchfreies Trennen der Stümpfe
- Thixotropisch
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit

GEBRAUCHSANWEISUNG

Mischverhältnis Pulver/Wasser:	100 g / 20 ml
Arbeitstemperatur:	20-23 °C
Mischen: Mechanisch unter Vakuum:	30 Sek.
Manuell:	60 Sek.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungszeit:	7 Min.
Anfangsbindezeit:	9 Min.
(Vicat-Verfahren gemäß ISO 6873)	
Endbindezeit:	13 Min.
(Vicat-Verfahren gemäß ISO 6873)	
Abbindeexpansion (2 Std.):	0,08 %
Härte (24 Std.):	247 N/mm²
Druckfestigkeit (1 Std.):	58 N/mm²

VERKAUFSFORMAT

Eco-Pack 12 kg (6 x 2 kg)

Gold	Weiß
1105-120	1105-121

Eimer 18 kg

Gold	Weiß
1105-180	1105-181

Test Pack 2 Kg (1 x 2 Kg)

Gold	Weiß
1105-K20	1105-K21



VERWANDTE PRODUKTE

ACCU-PIN

System zur Individualisierung von Stümpfen und Modellmontage.



TENSIO-SIL

Spannungsreduzierer für Alginate und Silikon. Modelle ohne Poren.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com