

# KIMBERLIT



MOIGNONS & MODÈLES / **PLÂTRE**



## LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT: MODÈLES EN 20 MINUTES

- AVEC LA MEILLEURE QUALITÉ, UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ
- IDEAL POUR PROTHÈSES FIXES, MOIGNONS ET MODÈLES
- CAD/CAM COMPATIBLE

PLÂTRE TYPE 4 • ISO 6873



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# KIMBERLIT

## PLÂTRE NATUREL HAUTES PERFORMANCES.

### AVANTAGES

- Démoulage précis en seulement 20 min
- Découpage de moignons sans brisures
- Thixotropique
- Haute résistance

### MODE D'EMPLOI

Dosage poudre/eau:	100 g / 20 ml
Température de travail:	20-23°C
Malaxage: Mécanique sous vide:	30 sec.
Manuel:	60 sec.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Temps de travail:	7 min.
Temps de prise: Début:	9 min.
(Test Vicat selon ISO 6873)	
Temps de prise: Finition:	13 min.
(Test Vicat selon ISO 6873)	
Taux d'expansion (2 h.):	0.08 %
Dureté (24 h.):	247 N / mm <sup>2</sup>
Résistance à l'écrasement (1 h.):	58 N / mm <sup>2</sup>

### CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

#### Eco-Pack 12 Kg (6 x 2 Kg)

Chamois	Blanc
1105-120	1105-121

#### Seau 18 Kg

Chamois	Blanc
1105-180	1105-181

#### Test Pack 2 Kg (1 x 2 Kg)

Chamois	Blanc
1105-K20	1105-K21



### PRODUITS ASSOCIÉS

#### ACCU-PIN

Système de précision pour la réalisation de modèles de coupe sans pins.



#### TENSIO-SIL

Réducteur de tensions pour alginate et silicone. Modèles sans porosités.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)