



RESIN-GIPS PLUS

MOIGNONS & MODÈLES / PLÂTRE



PLÂTRE FLUIDE AVEC RÉSINE

- PLUS DE RÉSINE DE CONTENUE
- MEILLEURE RÉSISTANCE À L'ABASION
- PERMET UNE MEILLEURE FINITION AVEC LE COULEUR GRIS
- SURFACES TRÈS LISSES. DURETÉ MAXIMUM

PLÂTRE TYP 4 • ISO 6873



protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

RÉSIN-GIPS PLUS

PLÂTRE DENTAIRE NATUREL EXTRA-DUR ENRICHIE DE RÉSINE DE GRANDE QUALITÉ, TYPE 4, HAUTES PERFORMANCES.

UTILISATION

Production de moignons et de maîtres modèles pour la technique de la prothèse fixée. Idéal pour la fabrication des modèles pour inlays, pour facettes céramique, pour prothèses amovo-inamovibles et pour la prothèse implanto-portée.

AVANTAGES

Nouvelle formule améliorée:

- **Plus de résine de contenue**
- **Meilleure résistance à l'abrasion**

Grâce à une formulation spéciale, l'état de surface est remarquablement lisse et dur.

Expansion très faible, grande stabilité dimensionnelle.

Compatible avec tous les matériaux à empreinte.

Travail de détourage et de taille rendu plus agréable grâce à la résine: formation de copeaux non sécants.

Évite la formation de poussières dans le laboratoire.

Précision optimale dans la restitution des détails.

Prise du plâtre : effet « snap ».

Plâtre très fluide.

MODE D'EMPLOI

Dosage poudre/eau: 100 g / 20 ml

Température de travail: 20-23°C

Malaxage: Mécanique sous vide: 30 seg.

Verser la poudre sur de l'eau déminéralisée selon la proportion recommandée.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

1108-062 **Eco-pack 6 kg** Couleur Gris
(3 x 2 kg sachets d'aluminium)

1108-K20 **Test Pack 1 kg** Couleur Gris
(1 x 2 kg sachets d'aluminium)



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Temps de travail: 7 min.

Temps de prise: Début: 8 min.

(Test Vicat selon ISO 6873)

Temps de prise: Finition: 10 min.

(Test Vicat selon ISO 6873)

Prise définitive: 30 min.

Taux d'expansion (2 h.): 0.10 %

Résistance à l'écrasement après 1 h.: 50 MPa



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com