



RESIN-GIPS PLUS

MONCONI & MODELLI / GESSO



GESSO FLUIDO CON RESINA

- PIÙ CONTENUTO DI RESINA
- MIGLIORE RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- IL COLORE GRIGIO, PERMETTE UNA MIGLIORE FINITURA
- SUPERFICI MOLTO LISCE. DUREZZA MASSIMA

GESSO TIPO 4 • ISO 6873


protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

RESIN-GIPS PLUS

**GESSO NATURALE EXTRA-DURO CLASSE 4,
CON AGGIUNTA DI RESINA,
PER ALTE PRESTAZIONI.**

USO

Gesso specialmente studiato per realizzazione di modelli per protesi scheletriche, corone, ponti, inlays, lavori misti e modellimaestro, con la tecnica del metallo prezioso e la ceramica.

VANTAGGI

Nuova formula migliorata:

- **Più contenuti in resina**
- **Migliore resistenza all'abrasione**

La sua formula speciale con resina permette di ottenere superfici levigate e dure.

Offre alta resistenza all'abrasione.

Compatibile con tutti i materiali da stampo.

Alta stabilità dimensionale grazie alla bassa espansione.

Si lavora facilmente senza generare polvere nel laboratorio.

Uso agevole grazie alla buona fluidità.

Ottima riproduzione dei dettagli.

Effetto "snap-setting".

MODALITÀ D'USO

Proporzioni nell' impasto: 100 g / 20 ml

Temperatura di lavorazione: 20-23°C

Tempo di miscelazione: Miscelazione meccanica: 30 seg.

Aggiungete la polvere all'acqua, rispettando le proporzioni raccomandata.

FORMATO DI VENDITA

1108-062 **Eco-pack 6 kg** Colore Grigio
(3 x 2 kg sacchetti di alluminio)

1108-K20 **Test Pack 1 kg** Colore Grigio
(1 x 2 kg sacchetti di alluminio)



CARATTERISTICHE FISICHE

Tempo di lavorazione: 7 min.

Indurimento Iniziale: 8 min.

(Test Vicat secondo ISO 6873)

Indurimento Finale: 10 min.

(Test Vicat secondo ISO 6873)

Tempo di indurimento complessivo: 30 min.

Espansione di presa (2 h.): 0.10 %

Resistenza alla compressione (1 h.): 50 MPa



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com