

ISOGIPS



SEPARADORES

NUEVO



SEPARADOR YESO-YESO

- SEPARACIÓN EFECTIVA Y RÁPIDA
- NO FORMA PELÍCULA
- PENETRA EN LA SUPERFICIE Y CIERRA LOS POROS



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS


ISOGIPS

AGENTE SEPARADOR YESO-YESO.

EXCELENTES PROPIEDADES AISLANTES. PENETRA EN LA SUPERFICIE DE LA ESCAYOLA Y CIERRA LOS POROS ABIERTOS.

SEPARACIÓN EFECTIVA DE LOS COMPONENTES DE YESO SIN FORMACIÓN DE PELÍCULA ENTRE ELLOS.

APLICACIONES

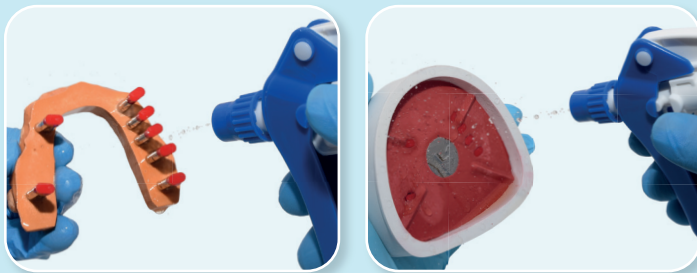

- Separación de arcadas con pines de la base zócalo
- Separación de Split-Cast
- Separación del modelo del yeso articulación

VENTAJAS

- Separación muy rápida
- No forma película
- Penetra en la superficie y cierra los poros
- La superficie se endurece, se vuelve lisa y repelente al agua.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto uniformemente sobre el modelo de yeso mediante un espray.

Dejar secar unos 10 segundos.

Se puede quitar el exceso y secar con aire comprimido.

FORMATO DE VENTA

3215-100	Botella	1.000 ml
3215-025	Pulverizador	250 ml

PRODUCTOS RELACIONADOS




KIMBERLIT

Yeso natural extraduro de alta densidad.



QUICK-ROCK

Yeso especial para la articulación.

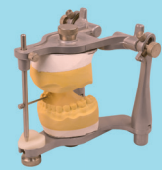

FLU-STONE

Yeso fluido autonivelante especial para zócalos.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com