



# STRATOGEL 3D

TRENNMITTEL

NEU



## TRENNGEL FÜR 3D-MODELLE

- EINFACHE ANWENDUNG: ES WIRD NUR EINE SCHICHT MIT EINEM PINSEL AUFGETRAGEN
- KEINE VERUNREINIGUNG VON 3D-HARZ UND ACRYL
- LEICHT MIT WASSER ZU ENTFERNEN



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# STRATOGEL 3D

**GEL MITTLERER VISKOSITÄT, DAS AUF DIE OBERFLÄCHE DES 3D-HARZMODELLS AUFGETRAGEN WIRD.**

## VORTEILE

- Einfache Anwendung: Es wird nur eine Schicht mit einem Pinsel aufgetragen
- Bildet eine sehr dünne Trennschicht
- Verunreinigt 3D-Harz und Acrylglas nicht
- Leicht mit Wasser zu entfernen

## BESCHREIBUNG

Das Gel lässt sich trotz seiner Viskosität leicht auf der Oberfläche verteilen und bildet nach dem Trocknen eine dünne Kunststoffschicht. STRATOGEL wirkt als Trennfolie zwischen dem 3D-Kunststoffmodell und dem Acrylharz.

Das Produkt wird in der richtigen Viskosität geliefert, um mit einer einzigen Schicht wirksam zu sein.

Bei raueren Oberflächen (Druckmodelle größer als 100 Mikrometer) kann jedoch eine zweite Schicht auf die erste Schicht aufgetragen werden. Es ist wichtig, dass die erste Schicht vollständig trocken ist.

Nach dem Trocknen bleibt es auf dem Acrylharz haften und das 3D-Harzmodell ist völlig sauber. Die Kunststoffschicht lässt sich mit Wasser und einer Bürste leicht entfernen. STRATOGEL hinterlässt keine Rückstände, greift das Acrylharz oder das 3D-Harzmodell nicht an und verändert dessen Eigenschaften nicht. Es enthält keine toxischen Elemente.

## VERKAUFSFORMAT

3280-100	Flasche	100 ml
3280-M10	Test pack	25 ml

## VERWANDTE PRODUKTE

### TECHNO SIN Tixo



Schnell modellierbares orthodontisches Harz.

**WENN SIE KEIN ORTHORESIN\* MEHR HABEN, IST DIES DIE LÖSUNG!**

\*Eingetragenes Warenzeichen von Degudent-Dentsply

### LUX 3D MODEL 4K



**TPO FREE**



3D-Druckharz für Zahnmodelle.



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

**protechno@protechno.com**

**www.protechno.com**