

# STRATOGEL 3D



ISOLANTI

NUOVO



## GEL DI SEPARAZIONE PER MODELLI 3D

- FACILE APPLICAZIONE: UNO STRATO È APPLICATO CON UN PENNELLO
- NON CONTAMINA LA RESINA 3D E GLI ACRILICI
- FACILE DA RIMUOVERE CON ACQUA



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# STRATOGEL 3D

**GEL A MEDIA VISCOSITÀ DA APPLICARE SULLA SUPERFICIE DEL MODELLO IN RESINA 3D.**

## VANTAGGI

- Facile applicazione: si applica un solo strato con un pennello
- Crea uno strato di separazione molto sottile
- Non contamina la resina 3D e gli acrilici
- Si rimuove facilmente con l'acqua

## DESCRIZIONE

Il gel, nonostante la sua viscosità, si stende facilmente sulla superficie e quando è asciutto crea un sottile strato di plastica. STRATOGEL agisce come una pellicola di separazione tra il modello in resina 3D e la resina acrilica. Il prodotto è fornito alla giusta viscosità per essere efficace con una sola mano.

Tuttavia, un secondo strato può essere applicato sopra il primo strato nel caso di superfici più ruvide (modelli di stampa più grandi di 100 micron). È necessario che la prima mano sia completamente asciutta.

Una volta asciutto, rimane aderente alla resina acrilica e il modello in resina 3D è completamente pulito. Lo strato di plastica si rimuove facilmente con acqua e una spazzola. STRATOGEL non lascia residui, non attacca la resina acrilica o il modello in resina 3D e non ne altera le proprietà. Non contiene elementi tossici.

## FORMATO DI VENDITA

3280-100	Bottiglia	100 ml
3280-M10	Test pack	25 ml

## PRODOTTI ASSOCIATI

### TECHNO SIN Tixo



Resina ortodontica a modellazione rapida.

SE HAI FINITO  
ORTHORESIN\*,  
QUESTO È QUELLO CHE FA PER TE!

\*Marchio registrato di Degudent-Dentsply

### LUX 3D MODEL 4K



**TPO  
FREE**



Resina da stampa 3D per modelli dentali.



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

**protechno@protechno.com**

**www.protechno.com**