



## ELIMINAR LOS DEFECTOS DE ESCANEADO

- PINTURA PARA ELIMINAR LOS DEFECTOS DE ESCANEADO EN ZONAS CON BRILLOS
- ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA PIEZAS METÁLICAS



# SCAN-LAC

## PINTURA ANTIREFLEJANTE PARA EL ESCANEADO CAD/CAM

### APLICACIONES

- Para pilares metálicos en prótesis sobre implantes cimentados
- Para posicionadores metálicos en prótesis sobre implantes atornillados

### VENTAJAS

- Se obtiene una muy fina capa totalmente opaca y sin reflejos
- Fácilmente eliminable, solamente con agua
- Aplicación directa con el pincel, mejora el control sobre la zona a aplicar

### MODO DE EMPLEO



La consistencia del producto es bastante líquida. Por su composición, se puede evaporar fácilmente si el envase permanece abierto.

Recomendamos verter una pequeña cantidad de producto en el vasito suministrado y así mantener la botella abierta el mínimo tiempo posible.

Se adjunta una botella de líquido diluyente para corregir la densidad del producto en caso que sea demasiado espeso lo que generaría una capa demasiado gruesa.

Pintar con el pincel la zona con reflejos a escanear, creando una fina capa.

Dejar secar unos segundos y la pieza ya está lista para ser escaneada. Posteriormente se pueden eliminar los restos simplemente con agua.

### ALMACENAJE Y CADUCIDAD

La estabilidad del producto es de 2 años. Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

### FORMATO DE VENTA

0610-150 15 ml + 15 ml + pincel Kit



### PRODUCTO ASOCIADO

**KIMBERLIT** | Yeso natural extraduro de alta densidad.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)