

# TENSIO-SIL

SEPARADORES



## MODELOS SIN POROS

- LÍQUIDO REDUCTOR DE TENSIONES QUE EVITA LA FORMACIÓN DE POROS POR AIRE ATRAPADO
- FACILITA QUE EL YESO FLUYA SOBRE LA SUPERFICIE DE IMPRESIÓN INCLUSO EN LOS DETALLES MÁS PEQUEÑOS



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# TENSIO-SIL

## LÍQUIDO REDUCTOR DE TENSIONES.

### APLICACIONES

- Vaciado de modelos de yeso en impresiones de silicona, alginato o poliéter
- Confección de modelos duplicados de revestimiento sobre silicona

### VENTAJAS

- Se obtienen modelos con una elevada definición de detalles y libres de poros
- De base acuosa: No contiene alcohol, por lo que no precisa secado antes del vaciado y no afecta al fraguado del yeso
- Práctico spray rellenable + envase recarga de 1 litro

### MODO DE EMPLEO

Aplicar preferiblemente con el spray o con un pincel uniformemente sobre el molde o cubeta de impresión.

Eliminar el exceso de producto, sacudiendo ligeramente la cubeta, sin necesidad de secado.

Vaciar el yeso o revestimiento con una ligera vibración.

### ALMACENAJE Y CADUCIDAD

La estabilidad del producto es de 2 años. Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

### FORMATO DE VENTA

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| 3260-104 | Botella recarga | 1.000 ml |
| 3260-124 | Spray           | 125 ml   |
| 3260-M54 | TEST PACK Spray | 50 ml    |



### PRODUCTO ASOCIADO

#### KIMBERLIT

Yeso natural extraduro de alta densidad.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169  
Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain  
[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)  
[www.protechno.com](http://www.protechno.com)