

TENSIO-SIL



SEPARADORES



MODELOS SIN POROS

- LÍQUIDO REDUCTOR DE TENSIONES QUE EVITA LA FORMACIÓN DE POROS POR AIRE ATRAPADO
- FACILITA QUE EL YESO FLUYA SOBRE LA SUPERFICIE DE IMPRESIÓN INCLUSO EN LOS DETALLES MÁS PEQUEÑOS



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

TENSIO-SIL

LÍQUIDO REDUCTOR DE TENSIONES.

APLICACIONES

- Vaciado de modelos de yeso en impresiones de silicona, alginato o poliéter
- Confección de modelos duplicados de revestimiento sobre silicona

VENTAJAS

- Se obtienen modelos con una elevada definición de detalles y libres de poros
- De base acuosa: No contiene alcohol, por lo que no precisa secado antes del vaciado y no afecta al fraguado del yeso
- Práctico spray rellenable + envase recarga de 1 litro

MODO DE EMPLEO

Aplicar preferiblemente con el spray o con un pincel uniformemente sobre el molde o cubeta de impresión.

Eliminar el exceso de producto, sacudiendo ligeramente la cubeta, sin necesidad de secado.

Vaciar el yeso o revestimiento con una ligera vibración.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

La estabilidad del producto es de 2 años. Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

FORMATO DE VENTA

3260-104	Botella recarga	1.000 ml
3260-124	Spray	125 ml
3260-M54	TEST PACK Spray	50 ml



PRODUCTO ASOCIADO

KIMBERLIT

Yeso natural extraduro de alta densidad.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com