



# TENSIO-SIL

SEPARATORI



## MODELLI PRIVI DI PORI

- LIQUIDO TENSIOATTIVO CHE EVITA LA FORMAZIONE DI PORI A CAUSA DELLA PRESENZA D'ARIA
- FACILITA IL FLUSSO DEL GESSO SULLA SUPERFICIE DELL'IMPRONTA ANCHE NEI PARTICOLARI PIÙ RIDOTTI



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# TENSIO-SIL

## LIQUIDO TENSIOATTIVO.

### APPLICAZIONI

- Colatura di modelli in gesso in impronte di silicone, alginato o polietere
- Realizzazione di modelli duplicati di rivestimento su silicone

### VANTAGGI

- Si ottengono modelli con elevata definizione dei dettagli e privi di pori
- Con base acquosa: Non contiene alcool per cui non necessita asciugatura prima della colatura e non influisce sull'indurimento del gesso
- Pratico spray ricaricabile + ricarica da 1 litro

### MODALITÀ D'USO

Applicare preferibilmente con lo spray o con un pennello in modo uniforme sullo stampo o sul portaimpronte.

Eliminare il prodotto in eccesso scuotendo leggermente il portaimpronte, senza necessità di asciugare.

Colare il gesso o il rivestimento con una leggera vibrazione.

### CONSERVAZIONE E SCADENZA

La stabilità del prodotto è di 2 anni. Conservare il prodotto ben chiuso nel proprio imballaggio originale e in un luogo fresco e asciutto.

### FORMATO DI VENDITA

3260-104	Flacone di ricarica	1.000 ml
3260-124	Spray	125 ml
3260-M54	TEST PACK Spray	50 ml



### PRODOTTO ASSOCIATO

#### KIMBERLIT

Gesso naturale extraduro ad alta densità.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169  
Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain  
[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)  
[www.protechno.com](http://www.protechno.com)