


# DUPLIFLEX

ADVANCED Shore 22



SILICONI

NUOVO

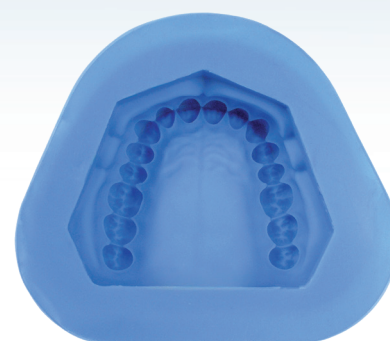

## SILICONE DI ADDIZIONE FLUIDO PER DUPLICAZIONI

- DUPLICATI DI ELEVATA PRECISIONE IN 25 MINUTI
- MINIMA CONTRAZIONE
- GRANDE ELASTICITÀ

ISO 14356 TYPE: 2



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# DUPLIFLEX

ADVANCED Shore 22

## SILICONE DI ADDIZIONE FLUIDO, A DUE COMPONENTI PER DUPLICAZIONI DI PRECISIONE.

### VANTAGGI

- Facile utilizzo: 1:1
- Facile reticolatura persino in assenza totale d'aria e di umidità
- Minima contrazione
- Elevata e costante precisione
- Grande elasticità

### MODALITÀ D'USO

Aggiungere 100 parti di **DUPLIFLEX A** a 100 parti di **DUPLIFLEX B**. Mescolare accuratamente in una bacinella pulita fino ad omogeneizzazione dei due componenti. Mescolare in modo lento onde evitare l'incorporazione di bolle d'aria.

Si raccomanda di mescolare sotto vuoto, o di utilizzare una macchina dosificatrice/miscelatrice.

Il modello deve trovarsi a una distanza minima di 5 mm dalle pareti della vaschetta e il silicone deve superare in bordo superiore del modello di almeno 4 mm.

### FORMATO DI VENDITA

**2 kg A+B** (1.000 g A + 1.000 g B)

Shore 22

5036-10T

**10 kg A+B** (5.000 g A + 5.000 g B)

Shore 22

5036-50T

**Kit INTRO 200 g A+B** (100 g A + 100 g B)

Shore 22

5036-M1T

### CARATTERISTICHE FISICHE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Dosaggio:                | 1:1 (comp. A : comp. B) |
| Tempo di miscelazione:   | 30 sec.                 |
| Tempo di lavorazione:    | 5 min.                  |
| Tempo di presa:          | 15 min.                 |
| Tempo di sformatura:     | 30 min.                 |
| Variazione dimensionale: | > 0,05 %                |
| Durezza dopo 24 h.:      | 22 Shore A              |

### PRODOTTO ASSOCIATO



#### MUFFOLA PLASTICA

Muffola per la duplicazione in silicone.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

**protechno@protechno.com**

**www.protechno.com**