



TECHNOJEL-PRO

DUBLIEREN



DUBLIERGEL, WIEDERVERWENDBAR UND VON GROSSER HÄRTE

- HERSTELLUNG VON PROTHESEN MIT DER KUNSTSTOFFGIESSTECHNIK
- IN MIKROWELLE, SCHMELZGERÄT ODER WASSERBAD VERWENDBAR
- VERBESSERTE HÄRTE, HOHE PRÄZISION UND DEFINITION



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

TECHNOJEL-PRO

**DUBLIERMASSE AUF AGAR-AGAR-BASIS,
WIEDERVERWENDBAR UND VON GROSSER HÄRTE**

VERWENDUNG

TECHNOJEL-PRO ist speziell für die Herstellung von Prothesen mit der Kunststoffgießtechnik, z.B. mit **ECO-CRYL PRO** angezeigt.

Es ist ebenfalls für die Herstellung von Duplikaten in phosphathaltigen und auf Polysilikat basierenden Einbettmassen zur Reproduktion von Modellen geeignet.

Nicht zur Herstellung von Duplikaten aus Gips geeignet.

VORTEILE

- Optimal für die Herstellung von Präzisionsduplikaten mit hoher Detailgenauigkeit, dank seiner verbesserten Härte.
- Mit besonderen elastischen und stabilen Eigenschaften
- Härtet ohne Blasenbildung aus
- Kostenreduzierung durch fortlaufenden Gebrauch und höhere Leistungsfähigkeit
- Einfach verwendbar: Schmelzen im Schmelzgerät, Wasserbad oder in der Mikrowelle

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Schmelzpunkt:	90 °C
Erstarrungspunkt:	Etwa 38 °C
Gebrauchstemperatur:	45-50 °C.
Gelierungszeit:	30-40 Min.

GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHMELZEN IM SCHMELZGERÄT ODER WASSERBAD

- Das Produkt bei bis zu 90 °C schmelzen, ohne zu kochen
- Das Produkt bis auf 45-50 °C abkühlen lassen
- Die Gelierungszeit beträgt in der Metallküvette etwa 30 Minuten.

SCHMELZEN IN DER MIKROWELLE

- Für etwa 500 g **TECHNOJEL-PRO**: Vier Minuten lang bei einer Leistung von 800 W erwärmen, vorsichtig umrühren und nochmals eine Minute lang bei 400 W erwärmen
- Bis zur Gebrauchstemperatur (40-50 °C) abkühlen lassen
Gelegentlich umrühren
- Ungefähre Abkühlungsdauer: 40 Minuten

VERWANDTE PRODUKTE

GIESSKÜVETTE

Küvette für Kunststoffgusstechnik mit Silikon oder Gelatine.



ECO-CRYL PRO

Selbstpolymerisierendes Harz für Voll- und Teilprothesen zur Anwendung bei Gusstechnik.



VERKAUFSFORMAT

5512-060	Eimer	6 kg
5512-010	Eimer	1 kg



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com
www.protechno.com