



CALIBRA-M RAPID

TECHNIQUE SQUELETTIQUE / REVÊTEMENTS

NOUVEAU



COULÉES SUR MODÈLE RAPIDES AVEC UNE EXCELLENTE PRÉCISION D'AJUSTAGE

- TECHNIQUE DE PRECHAUFFAGE CONVENTIONNEL ET RAPIDE
- LES SURFACES TRÈS LISSES GARANTISSENT DES PIÈCES COULÉES LISSES

TYPE 2 CLASSE 2 • ISO 15912:2016



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

CALIBRA-M RAPID


REVETEMENT ULTRA-FIN A BASE DE PHOSPHATES
POUR LA TECHNIQUE DE COULEE SUR MODELE
(CR-CO) ET TRAVAUX COMBINES D'IMPLANTS A
ENFOURNEMENT RAPIDE OU CONVENTIONNEL.

AVANTAGES

- Démoulage facile
- Reproduction des détails les plus fins
- Sablage facile
- Préchauffage rapide ou conventionnel


POSSIBILITES DE PRECHAUFFAGE

Préchauffage rapide:

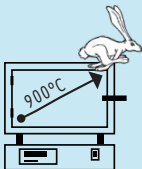

- Laisser le cylindre durcir pendant 20 minutes, puis placer le cylindre dans le four préchauffé à 900°C.
- Maintenir la température finale de 950-1000°C pendant au moins 45-60 minutes.

Préchauffage conventionnel:

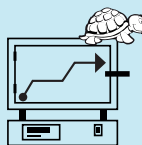

- Placer les cylindres dans le four, de préférence à froid, après au moins 30 minutes de prise.
- Maintenir-le à 250°C pendant 20-30 minutes.
- Régler la température de coulée entre 950 et 1000°C.
- Maintenir la température finale pendant au moins 45-60 minutes.
- La meilleure expansion est obtenue avec un chauffage de 5°C par minute.

PROPRIETES PHYSIQUES

Ecoulement:	110-120 MM
Prise initiale:	4-5 min.
Résistance à la compression:	10-12 MPa
Expansion thermique:	0,9 % (950°C)

CONDITIONNEMENT

6626-180 **Poudre** 18 kg
45 x 400 g

6626-M10 **Kit Intro** 800 g
2 x 400 g + 120 ml

6610-100 **Liquide** EXPANSOR 1000 ml
6610-500 **Liquide** EXPANSOR 5000 ml

PRODUITS PARTENAIRES

DUPLIFLEX



Silicone par addition fluide, à deux composants pour duplicatas de précision.



TECHNOCAST-F



Alliage non précieux à base de Cobalt pour prothèses squelettés.



TECHNOPAINT

Revêtement fin pour châssis métalliques.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com