



ECO-CRYL COLD

SELBSTHÄRTEND / KUNSTSTOFFE



AUSBESSERUNGEN UND UNTERFÜLLUNGEN

- SCHNELLE AUSHÄRTUNG
- KOMPATIBEL MIT ALLEN ANDEREN ECO-CRYL-KUNSTSTOFFEN
- FLIESSFÄHIGE KONSISTENZ ZUM GIESSEN



TYP 2 · KLASSE 1 · ISO 20795-1:2013



ECO-CRYL COLD

SELBSTHÄRTENDES ACRYLHARZ, SPEZIELL FÜR REPARATUREN, AUFBAUTEN UND UNTERFÜLLUNGEN VON ACRYL-ZAHNPROTHESEN.

VORTEILE

- Schnelle Aushärtung
- Kompatibel mit allen anderen eco-cryl-Kunststoffen
- Fließfähige Konsistenz zum Giessen

GEBRAUCHSANWEISUNG

ARBEITSZEIT

Pulver und Flüssigkeit im folgenden Verhältnis abmessen:

21 g Pulver : 18 ml Flüssigkeit

Verarbeitungszeit (tropfbar)

2–5 Minuten bei einer Raumtemperatur von 20–21 °C.

ANWENDUNG

Tragen Sie die Masse mit einem Spachtel auf die Reparaturstelle auf und formen Sie dabei eine Schicht in der erforderlichen Dicke. Nach 2–5 Minuten nimmt die Masse eine plastische Konsistenz an; zu diesem Zeitpunkt darf sie nicht mehr bearbeitet werden.

ECO-CRYL COLD kann auch unter Druck verwendet werden; diese Art der Aushärtung ermöglicht die Herstellung porenfreier Reparaturen.

Nach dem Aushärten kann die Masse abgeschliffen und poliert werden.

VEREDELUNG UND POLIEREN

ECO-CRYL COLD kann auf die übliche Weise bearbeitet und poliert werden. Wir empfehlen die Verwendung der POLI-R-Pasten zum Schleifen und Polieren sowie der POLI-B-Paste für den abschließenden Glanz.

VERKAUFSFORMAT UND FARBEN

9055-M20 **Kit Intro** 80 g

80 g + 60 ml + Dosierer

9055-020 **Pulver** 2 x 500 g 1.000 g

9055-030 **Pulver** 8 x 500 g 4 Kg

9056-020 **Flüssigkeit** Flasche 500 ml

9056-030 **Flüssigkeit** Dose 2000 ml

Verfügbare Farben: R1: Rosa und R1V: Rosa marmoriert.

VERWANDTE PRODUKTE



DURGUIX



Naturgips, für den allgemeinen Laborgebrauch.

TECHNOSIL

Trennlack für Acrylharz-Gips.



POLI-R

Gel zum Polieren von Prothesenkunststoff (Ersatz für den Bimsstein).

POLI-B

Polierpaste für Edelmetalle und Prothesenkunststoff.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com