

TECHNO SIN Tixo



SELBSTPOLYMERISATION / KUNSTSTOFFE



ORTHODONTISCHES HARZ

- SALZ- UND PFEFFERTECHNIK
- EINFACHE MODELLIERUNG DANK SEINER THIXOTROPEN EIGENSCHAFT (DAS HARZ FÄLLT NICHT AB)
- DURCHSICHTIG, PORENFREI UND NICHT VERGILBEND

CE

1639

MD

TYP 1 • ISO 20795-2:2013



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

TECHNO SIN Tixo

SELBSTHÄRTENDES ACRYLHARZ FÜR DIE HERSTELLUNG VON HERAUSNEHMBAREN ORTHODONTISCHEN APPARATUREN. GEEIGNET FÜR DIE SALZ- UND PFEFFERTECHNIK MIT EINEM BESONDERS THIXOTROPEN VERHALTEN.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Handhabung, Farbstabilität, schnelle Verarbeitung.

VORTEILE

- Schnelle Polymerisation
- Durchsichtig
- Porenfrei
- Nicht vergilbend

ANWENDUNGSTECHNIK

Die Flüssigkeit mit einem Messbecher dosieren, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Die Flüssigkeit (10–20 Tropfen) auf das Modell auftragen und gleichmäßig zu einem dünnen Film verteilen.

Das Pulver auf das feuchte Modell streuen und überschüssiges Pulver entfernen.

Den Vorgang schichtweise wiederholen, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. Zum Schluss eine Schicht Monomer auftragen, um die Oberflächenglätte zu verbessern. In Wasser bei 40–45 °C unter Druck (2 bar) 8–10 Minuten aushärten lassen.

ENDBEARBEITUNG UND POLIEREN

TECHNO SIN Tixo kann mit herkömmlichen Methoden bearbeitet und gereinigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von POLI-R-Pasten zum Schleifen und Polieren sowie von POLI-B für die Endpolitur. Reparaturen können mit demselben Material durchgeführt werden.

VERKAUFSFORMAT

9065-M20	Kit Intro	80 g
80 g + 60 ml + Spender		

9065-020	Pulver	2 x 500 g	1 kg
9065-030	Pulver	8 x 500 g	4 kg

9066-020	Flüssigkeit	Flasche	500 ml
9066-030	Flüssigkeit	Dose	2000 ml

VERWANDTE PRODUKTE

ORTOGUIX

Spezialhartgips für kieferorthopädische Modelle.



TECHNOSIL

Trennlack für Acrylharz-Gips.


TECHNOSIL SUPER

Trennlack mit Emulsionsöle für eine glatte, filmdünne Oberfläche.



STRATOGEL 3D

Trenngel für 3D-Modelle.

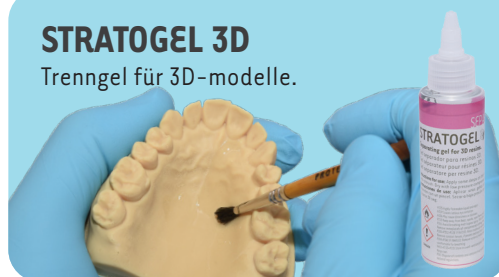

protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com