



TECHNO SIN Tixo

AUTOPOLIMERIZABLES / RESINAS



RESINA PARA ORTODONCIA

- TÉCNICA DE SAL Y PIMIENTA
- FÁCIL MODELADO GRACIAS A SU PROPIEDAD TIXOTRÓPICA (LA RESINA NO SE CAE)
- TRANSPARENTE, LIBRE DE POROS Y NO AMARILLEA

CE

1639

MD

TIPO 1 • ISO 20795-2:2013



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

TECHNO SIN Tixo

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE, PARA LA CONFECCIÓN DE APARATOS DE ORTODONCIA REMOVIBLES. INDICADA PARA LA TÉCNICA DE SAL Y PIMIENTA CON UN COMPORTAMIENTO ESPECIALMENTE TIXOTRÓPICO.

PROPIEDADES

Fácil manipulación, estabilidad cromática, proceso rápido.

VENTAJAS

- Polimerización rápida
- Transparente
- Libre de poros
- No amarillea

TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dosificar el líquido desde un vaso medidor para prevenir contaminaciones.

Aplicar el líquido sobre el modelo (10–20 gotas), distribuyéndolo de forma uniforme hasta formar una película fina.

Espolvorear el polvo sobre el modelo húmedo y eliminar el exceso.

Repetir la aplicación por capas hasta alcanzar el espesor deseado.

Finalizar con una capa de monómero para mejorar el alisado superficial.

Polimerizar en agua a 40–45 °C bajo presión (2 bar) durante 8–10 minutos.

ACABADO Y PULIDO

TECHNO SIN Tixo se puede acabar y pulir con el método acostumbrado. Recomendamos el uso de las pastas **POLI-R** para el desbastado y pulido y **POLI-B** para el abrillantado final. Las reparaciones se pueden realizar con el mismo material.

FORMATO DE VENTA

9065-M20	Kit Intro	80 g
	80 g + 60 ml + dosificador	

9065-020	Polvo	2 x 500 g	1 kg
----------	--------------	-----------	------

9065-030	Polvo	8 x 500 g	4 kg
----------	--------------	-----------	------

9066-020	Líquido	Botella	500 ml
----------	----------------	---------	--------

9066-030	Líquido	Lata	2000 ml
----------	----------------	------	---------

PRODUCTOS RELACIONADOS

ORTOGUIX

Yeso piedra especial para modelos de estudio en ortodoncia.



TECHNOSIL

Separadores para resinas acrílicas.

TECHNOSIL SUPER

Barniz separador con aceites emulsionados, separación eficaz sin espesor.



STRATOGEL 3D

Gel separador para modelos 3D.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com