

ECO-CRYL M

TERMOPOLIMERIZABLES / RESINAS



EN SÓLO **3**
MINUTOS



DIRECTAMENTE AL MICROONDAS



- AL MICROONDAS Y LISTO EN SÓLO 3 MINUTOS
- POLIMERIZACIÓN TRADICIONAL O MICROONDAS
- COLOR ESTABLE EN EL TIEMPO

CE
1639
MD

TYP 5 • ISO 20795-1:2013


protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

ECO-CRYL M

RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE,
PARA BASES DE DENTADURAS COMPLETAS Y PARCIALES.

VENTAJAS

Distintas posibilidades de polimerización:

- Método tradicional con agua hirviendo
- Directamente al microondas

Consistencia plástica y maleable

Color resistente en el tiempo

Se puede utilizar con dientes acrílicos

MODO DE EMPLEO

TIEMPO DE TRABAJO

- Para 1 prótesis: 21 g polvo / 18 ml líquido
- Para 2 prótesis: 42 g polvo / 36 ml líquido

Tiempo de relleno/enmuflado

Tiempo de relleno inicial: a partir del minuto 15-20 (20° C)

Tiempo de relleno final: hasta el minuto 30 (20° C)

POLIMERIZACIÓN

a) Polimerización convencional:

Colocar la mufla en agua templada (30-40°C). Calentar hasta 100°C y dejar hervir durante 20 minutos. Asegúrese de que haya un mínimo de 3 litros de agua en el recipiente. En el caso de polimerizar varias muflas a la vez, debe haber un mínimo de 2 litros de agua por cada mufla.

Después de completada la polimerización, dejar enfriar la mufla al aire libre durante un periodo mínimo de 30 minutos, seguidamente puede sumergirse en agua fría

b) Polimerización en microondas:

Introducir la mufla en el microondas y calentar durante 3 min a una potencia de 700 W.

Después de completada la polimerización se puede enfriar la mufla sumergiendola directamente en agua fría durante unos 45 minutos. La MUFLA DE MICROONDAS está realizada en un material plástico que no es conductor de la temperatura por lo que el enfriamiento será progresivo y no provocará contracciones en la resina.

ACABADO Y PULIDO

ECO-CRYL M se puede acabar y pulir con el método acostumbrado. Recomendamos el uso de las pastas **POLI-R** para el desbastado y pulido y **POLI-B** para el abrillantado final.

FORMATO DE VENTA Y COLORES

9010-M20 **Kit Intro** 80 g
80 g + 60 ml + dosificador

9010-020 **Polvo** 1.000 g
2 x 500 g

9011-020 **Líquido** 500 ml
Botella

9098-000 **Mufla completa**
9098-100 **Placa de prensado**

Los colores disponibles: R1: Rosa y R1V: Rosa Veteado.



MUFLA MICROONDAS

PRODUCTOS ASOCIADOS



POLI-R

Gel para el pulido y abrillantado de resinas acrílicas.

POLI-B

Gel para el abrillantado de metales preciosos y resinas acrílicas.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com