

PROTEC-FIX



FOTOPOLIMERIZZABILE / RESINE



RIPARAZIONE DELLE PROTESI IN 10 MINUTI

- RIPARATORE DI PROTESI FOTOPOLIMERIZZABILE
- ELEVATA STABILITÀ
- FACILE APPLICAZIONE MEDIANTE SIRINGA



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

PROTEC-FIX

RESINA SOTTO FORMA DI GEL FOTOPOLIMERIZZABILE PARTICOLARMENTE ADATTA PER RIPARAZIONI.

PROPRIETÀ

PROTEC-FIX polimerizza tra 360 e 480 nm mediante qualsiasi dispositivo di fotopolimerizzazione standard entro l'intervallo specificato. Fotopolimerizzazione in assenza di vuoto.

COMPOSIZIONE: Resine acriliche e metacriliche, additivi e pigmenti.

APPLICAZIONI

- Lavorazione di protesi immediate anteriori per un elemento
- Ribasature in protesi parziale
- Rifinitura di piccole ribasature in protesi parziali o impianti
- Riparazioni di crepe o fratture in protesi acriliche
- Fissaggio di denti rotti in protesi complete o parziali
- Riparazione rapida di faccette anteriori
- Correzione di bolle, pori e crepe nella base di protesi acriliche

VANTAGGI

- Facile applicazione mediante siringa
- Elevata stabilità
- Risultati rapidi e precisi senza dover utilizzare silicone per matrici
- Non contiene MMA

LAVORAZIONE

Una volta aperto, utilizzare le cannule monouso fornite per un'applicazione più precisa.

Chiudere nuovamente la siringa dopo l'uso.



1. Applicare **PROTEC-FIX Bonder** prima di applicare la resina con un pennello su ogni parte acrilica (o dente).



2. Polimerizzare per circa 3 min.



3. In seguito applicare **PROTEC-FIX** con la siringa. Applicare uno strato uniforme di materiale (1-2 mm).



4. Polimerizzare per circa 3 min.

Per applicare il materiale una volta polimerizzato, non eliminare lo strato di inibizione superficiale, poiché ciò garantisce una sigillatura ottimale ed evita qualsiasi tipo di tensione nella resina.

Una volta finalizzato, rimuovere gli strati di inibizione dalla superficie con strumenti rotanti o isopropanolo.

RIFINITURA E LUCIDATURA

Una volta conclusa la polimerizzazione è possibile rifinire e lucidare con il metodo consueto. Raccomandiamo di utilizzare le paste **POLI-R** per la lucidatura e **POLI-B** per la brillantezza.

FORMATO DI VENDITA E COLORI

Kit standard

9030-100 3 siringhe (3 g) PROTEC-FIX rosa
+ 5 ml PROTEC-FIX bonder
+ 12 punte di applicazione

Accessori:

9030-001 Lampada a luce ultravioletta


protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com
www.protechno.com