



FLU-GIPS

Descripción:

Fluidificante y endurecedor para yesos de clase II y III

Utilización:

FLU-GIPS se presenta en forma concentrada para ser diluido con agua desmineralizada obteniendo mayor dureza, fluidez y superficies más finas con las mezclas de yesos de clase II y III

Características:

- Aumenta la dureza y la resistencia a la abrasión.
- Aumenta la resistencia a la flexión y a la compresión.

Método de trabajo:

El producto se presenta en forma de **concentrado** para obtener **25 litros** de solución de mezcla. Mezclar el contenido de una botella de 1 litro de FLU-GIPS con 24 litros de agua destilada

Para 100 ml de solución:

4 ml de FLU-GIPS
+ 96 ml de agua destilada

Presentación:

1190-100 Botella de 1 l

Precauciones de uso:

La estabilidad del producto es ilimitada (respetando las instrucciones de conservación.)

Estas indicaciones están basadas en nuestro nivel de conocimiento actual del producto basado en nuestras propias experiencias y ensayos y deben ser comprendidas sólo como valores indicativos no entendiéndose en ningún caso como una garantía del producto.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com