



METIL-COLOR

Descripción

Sistema de coloración de las resinas acrílicas a base de concentrados de metilmetacrilato coloreado
Utilizable en la tinción de los líquidos en la elaboración de placas de ortodoncia, así como para modificar el color de resinas rosas.

Composición

Líquido: metilmetacrilato-monómero + pigmentos

Instrucciones de uso

Este producto se presenta en forma de concentrado que deberá añadirse al líquido acrílico utilizado

Las proporciones recomendadas son las siguientes:

para la tinción de 1 botella de 500 ml

	mínimo (color suave)	máximo (color intenso)
METIL-COLOR	10 ml	25 ml

para la tinción en cada uso:

	mínimo (color suave)	máximo (color intenso)
METIL-COLOR	2 gotas	10 gotas
LÍQUIDO ACRÍLICO	10 ml	10 ml

Se Puede añadir la mínima cantidad de concentrado para obtener una placa ligeramente coloreada o bien la máxima para obtener un color más intenso. No sobrepasar la cantidad máxima recomendada ya que podría afectar a las propiedades del líquido acrílico

IMPORTANTE

Se debe agitar enérgicamente el concentrado antes de su uso ya que el pigmento se puede depositar en el fondo de la botella. Aunque se observe este efecto, una vez agitado y añadido en las proporciones adecuadas a el líquido acrílico se disuelve perfectamente el pigmento

A continuación realizar la prótesis como habitualmente

Caducidad y almacenamiento

METIL-COLOR mantiene todas sus propiedades durante un mínimo de 2 año. La fecha de caducidad está indicada en el envase.
Almacenar en lugar libre de humedad y a temperatura no superior a 25°C.
Mantener fuera del alcance de los rayos solares.

Presentación

KITS
9080-500 5 colores x 50 ml (verde, violeta, rojo, amarillo, naranja)

9080-501 Verde : botella 50 ml + gotero + medidor
9080-502 Violeta : botella 50 ml + gotero + medidor
9080-503 Rojo : botella 50 ml + gotero + medidor
9080-504 Amarillo : botella 50 ml + gotero + medidor
9080-505 Naranja : botella 50 ml + gotero + medidor

Precauciones de seguridad

METIL-COLOR contiene solventes inflamables y debe ser utilizado en zonas de no fumadores bien ventiladas y lejos de llamas o aparatos que desprendan calor.

El contacto con la piel, o los ojos debe ser prevenido con ropa de protección, así como, guantes y gafas. En caso de producirse contacto, lavar inmediatamente con abundante agua. El contacto prolongado con la piel puede producir hipersensibilización en personas susceptibles. Interrumpir su uso en caso de sensibilización. Un derrame de líquido debe ser inmediatamente limpiado y secado. En caso de fuego use un extintor, arena o tierra
Punto de inflamabilidad 10°C

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.

Para más información, véase la ficha de datos de seguridad existente para el producto METIL-COLOR. Pídaselas a su distribuidor habitual



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com