

## DESINFECTANTE Y DESCONTAMINANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

# zero#100

**zero#100** es una solución concentrada multienzimática, descontaminante y desinfectante de nivel intermedio con una formulación química avanzada (contiene una mezcla enzimática con elevada actividad proteo-lipo-lítica), micobactericida, fungicida, bactericida, activa contra virus con envoltura, específica para la preesterilización (descontaminación-desinfección y descomposición del biofilm microbiano) del instrumental odontológico y hospitalario crítico y semicrítico. **zero#100** puede utilizarse en cubas abiertas y cubas ultrasónicas. La solución, gracias a la presencia de antioxidantes, no tiene propiedades corrosivas.

### Modo de empleo:

Para limpiar el instrumental, diluir **zero#100** en agua al 1% (10 ml en 1 litro de agua) e introducir los instrumentos durante 10 minutos. Para una actividad descontaminante, diluir al 2% (20 ml en 1 litro de agua) e introducir los instrumentos durante un tiempo de contacto de 15 minutos. La solución diluida permanece activa durante 24 horas.

| Actividad                              | Microorganismos                           | Concentración de uso | Condiciones | Tiempo contacto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| VIRUCIDA<br>contra virus con envoltura | Virus con envoltura (incl. HIV, HBV, HCV) | 20 ml/l              | sucio       | 15 min.         |
|                                        | Vaccinia Virus MVA                        | 20 ml/l              | sucio       | 15 min.         |
| FUNGICIDA Y LEVITICIDA                 | Candida albicans atcc 10231               | 20 ml/l              | sucio       | 15 min.         |
|                                        | A. Niger dsm1988                          | 20 ml/l              | sucio       | 5 min.          |
|                                        | C. Albicans dsm1386                       | 20 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
|                                        | Pseudomonas aeruginosa atcc 15442         | 20 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
| BACTERICIDA                            | Staphylococcus aureus atcc 6538           | 20 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
|                                        | Enterococcus hirae atcc 10541             | 20 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
|                                        | S. Aureus dsm799                          | 20 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
|                                        | E. Coli dsm682                            | 10 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
|                                        | B. Cereus dsm31                           | 20 ml/l              | sucio       | 15 min.         |
|                                        | M. Terrae dsm43227                        | 20 ml/l              | sucio       | 10 min.         |
| MICOBACTERICIDA (tuberculicida)        |                                           |                      |             |                 |

Actividad y espectro de acción

**Composición:**  
Mezcla multienzimática 3 g.,  
Porción alquímica de tensioactivo catiónico 10 g.,  
Surfactantes 10 g.,  
Anticorrosivos, Agua purificada q.b. hasta 100 g.

**CONCENTRADO ACTIVO SOBRE FILM MICROBIAL**



Envase estándar  
ref. #100 botella de 1000 ml

| ELIMINACIÓN DEL BIOFILM MICROBIAL (tiempo de contacto 10 min. 20 ml/l) |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Microorganismo                                                         | logR |
| E. Coli dsm682                                                         | 5.56 |
| L. Monocytogenes                                                       | 5.31 |
| Salmonella atcc13311                                                   | 5.59 |
| S.Aureus dsm799                                                        | 6.36 |