

DISINFETTANTE E DECONTAMINANTE PER STRUMENTARIO CHIRURGICO E DISPOSITIVI MEDICI

zero#200

zero#200 è una miscela a base di acido peracetico derivato. Polvere a più componenti idrosolubile, per la preparazione di soluzioni decontaminanti, disinfettanti di alto livello, di dispositivi medici critici e semicritici ed in particolare dispositivi termosensibili. Utilizzabile in vasca libera o in ultrasuoni, la soluzione ha una durata di 24 ore. Non provoca fenomeni di corrosione.

Modalità di impiego:

zero#200 è una polvere idrosolubile da impiegare in soluzione acquosa alle diluizioni indicate:

10 g/l disinfezione di alto livello in 20 minuti

20 g/l disinfezione di alto livello in 10 minuti

Versare nella vaschetta la quantità di polvere impiegando il misurino (30 ml = 20 g); agitare leggermente. La soluzione è pronta già dopo 5 minuti.

Attività	Microrganismi	Concentrazione d'impiego	Condizioni	Tempi contatto
VIRUCIDA (incl. Virus HIV,HBV,HCV)	Poliovirus	20 g/l	sporco	5 min.
	Adenovirus	20 g/l	sporco	1 min.
	Murine norovirus (mnv)	20 g/l	sporco	10 min.
FUNGICIDA E LIEVITICIDA	Candida albicans atcc 10231	20 g/l	sporco	10 min.
	A. Niger dsm1988	5 g/l	sporco	12 min.
	C. Albicans dsm1386	5 g/l	sporco	5 min.
BATTERICIDA	Pseudomonas aeruginosa atcc 15442	20 g/l	sporco	10 min.
	Staphylococcus aureus atcc 6538	20 g/l	sporco	10 min.
	Enterococcus hirae atcc 10541	20 g/l	sporco	10 min.
	S. Aureus dsm799	10 g/l	sporco	15 min.
	Ps. Aeruginosa dsm939	10 g/l	sporco	15 min.
	E. Coli dsm682	10 g/l	sporco	10 min.
	B.subtilis	10 g/l	sporco	10 min.
	B. Cereus dsm31	10 g/l	sporco	8 min.
	Clostridium dsm	10 g/l	sporco	15 min.
	MICOBATTERICIDA (tubercolicida)	M. Terrae dsm43227	15 g/l	sporco
	M.avium dsm44157	20 g/l	sporco	10 min.
SPORICIDA	Bacillus subtilis atcc 6633	20 g/l	pulito	10 min.
	Carrier test su spore di b. Subtilis	20 g/l	pulito	10 min.

Attività e spettro di azione

Composizione:
100g contengono: sodio percarbonato 53g - Tetracetilendiammina (TAED) 23g - Acido citrico anidro - Enzimi - Sequestranti - Stabilizzanti - Alcalinizzanti ed Anticorrosivi.

**CONCENTRATO
A BASE DI
ACIDO ACETICO DERIVATO**



Confezione standard
ref. #200 barattolo da 1 kg