

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

zero#300 es una solución desinfectante en spray micobactericida, fungicida, bactericida, activa contra virus con envoltura. Específico para la sanitización, descontaminación y desinfección de dispositivos médicos. Solución acuosa, lista para usar.

Modo de empleo:

zero#300 se utiliza tal cual, sin dilución.

Desinfección en seco: con un dosificador a spray adecuado, nebulizar el producto abundantemente y de manera uniforme sobre las superficies y dispositivos a desinfectar, utilizando 40 ml/m². Dejar actuar durante al menos 5 minutos; si es necesario, secar. En caso de suciedad extrema, dejar actuar durante 15 minutos. No enjuagar para mantener un efecto biocida residual en las superficies.

Actividad	Microorganismos	Concentración de uso	Condiciones	Tiempo contacto
VIRUCIDA Contra virus con envoltura	Contra virus con envoltura (incl. HIV, HBV, HCV)	Listo para usar	limpio	5 min.
		Listo para usar	sucio	15 min.
		Listo para usar	limpio	5 min.
	Vaccinia Virus MVA	Listo para usar	sucio	15 min.
FUNGICIDA Y LEVITICIDA	A. Niger dsm1988	Listo para usar	sucio	5 min.
	C. Albicans dsm1386	Listo para usar	sucio	5 min.
BACTERICIDA	p. Aeruginosa DSM939	Listo para usar	sucio	2 min.
	E. Coli dsm682	Listo para usar	sucio	2 min.
	Salmonella ATCC 1331	Listo para usar	sucio	2 min.
MICOBACTERICIDA (tuberculicida)	M. Terrae dsm43227	Listo para usar	sucio	5 min.
	M. Avium DSM 44157			

Actividad y espectro de acción

zero#300

Composizione:
Poliesametenbiguanida 0,2 g,
Cloruro de dimetildicetilamonio
0,5 g, Tensioactivos catiónicos,
Tensioactivos no iónicos,
Secuestrantes, Agua hasta 100 g.

LISTO PARA USAR
FRAGANCIA: MANZANA VERDE



Envase estándar
ref. #300 botella de 750 ml
ref. #300/5 garrafa de 5 l