

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

zero#310 es un desinfectante en spray de nivel intermedio con acción tuberculicida, fungicida, bactericida, activo contra virus con envoltura. Específico para la desinfección y limpieza de instrumentos semicríticos y no críticos, como piezas de mano de unidades dentales (turbinas, contrangulares, abladores), equipos de fibra óptica, superficies operatorias, muebles sanitarios, equipos electromédicos y quirúrgicos en general. **zero#310** está formulado en solución hidroalcohólica.

Modo de empleo:

zero#310 se utiliza tal cual, sin dilución.

Nebulizar con un dosificador a spray directamente sobre las superficies o equipos a tratar. Dejar actuar según los tiempos indicados en la tabla.

Actividad	Microorganismos	Concentración de uso	Condiciones	Tiempo contacto
VIRUCIDA Contra virus con envoltura.	Contra virus con envoltura. (incl. HIV, HBV, HCV)	Listo para usar	limpio	5 min.
		Listo para usar	sucio	10 min.
		Listo para usar	limpio	5 min.
	Vaccinia Virus MVA	Listo para usar	sucio	10 min.
	Poliovirus type 1	Listo para usar	limpio	5 min.
FUNGICIDA Y LEVITICIDA	A. Niger dsm1988	Listo para usar	sucio	5 min.
	C. Albicans dsm1386	Listo para usar	sucio	5 min.
BACTERICIDA	S. Aureus dsm799	Listo para usar	sucio	5 min.
	E. Coli dsm682	Listo para usar	sucio	5 min.
	Salmonella ATCC 1331	Listo para usar	sucio	5 min.
MICOBACTERICIDA (tuberculicida)	M. Terrae dsm43227	Listo para usar	sucio	5 min.
	M. Avium DSM 44157	Listo para usar	sucio	5 min.

Actividad y espectro de acción

zero#310



Composición:
Mezcla alcohólica (alcohol etílico e isopropílico) 30 g, O-fenilfenol, Cloruro de dimetildicetilamonio, Tensioactivos no iónicos, Secuestrantes, Agua purificada hasta 100 g.

Envase estándar
ref. #310 botella de 750 ml
ref. #310/5 garrafa de 5 l