

DISINFEZIONE SUPERFICI E DISPOSITIVI MEDICI

zero#310 è un disinfettante spray di livello intermedio ad azione tubercolicida, fungicida, battericida, attivo su virus con mantello. Specifico per la disinfezione e deterzione di strumenti semicritici e non critici, quali manipoli di riuniti odontoiatrici (turbine, contrangoli, ablatori), apparecchiature a fibre ottiche, superfici operatorie, mobili sanitari, apparecchiature elettromedicali e chirurgiche in genere. **zero#310** è formulato in soluzione idroalcolica.

Modalità di impiego:

zero#310 si usa tal quale senza diluizione.

Nebulizzare con apposito erogatore a spruzzo direttamente sulle superfici o presidi da trattare. Lasciare agire come da tempi indicati in tabella.

Attività	Microrganismi	Concentrazione d'impiego	Condizioni	Tempi contatto
VIRUCIDA Su virus con mantello	virus con mantello (incl. HIV, HBV, HCV)	Pronto all'uso	Pulito	5 min.
		Pronto all'uso	Sporco	10 min.
	Vaccinia Virus MVA Poliovirus type 1	Pronto all'uso	Pulito	5 min.
		Pronto all'uso	Sporco	10 min.
		Pronto all'uso	Pulito	5 min.
FUNGICIDA E LIEVITICIDA	A. Niger dsm1988	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	C. Albicans dsm1386	Pronto all'uso	sporco	5 min.
BATTERICIDA	S. Aureus dsm799 E. Coli dsm682 Salmonella ATCC 1331	Pronto all'uso	sporco	5 min.
		Pronto all'uso	sporco	5 min.
		Pronto all'uso	sporco	5 min.
MICOBATTERICIDA (tubercolicida)	M. Terrae dsm43227 M. Avium DSM 44157	Pronto all'uso	sporco	5 min.

Attività e spettro di azione

zero#310



Composizione:
Miscela alcolica (alcol etilico e isopropilico) 30g -
O-Feinilfenolo -
Dimetildidecilammonio cloruro - Tensioattivi non ionici - Sequestranti - Acqua depurata a 100g.

Confezione standard
ref. #310 flacone da 750 ml
ref. #310/5 tanica da 5 l