

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN

zero#500 es una solución concentrada detergente-descontaminante y desinfectante de nivel intermedio, micobactericida, fungicida, bactericida, activa contra virus con envoltura, específica para circuitos de aspiración quirúrgica. La solución, gracias a la presencia de antioxidantes, no tiene características corrosivas.

Modo de empleo:

Para limpiar los circuitos, diluir al 1% (10 ml en 1 litro de agua) y dejar actuar durante 10 minutos. Para una actividad descontaminante, diluir al 2% (20 ml en 1 litro de agua) y dejar fluir durante un tiempo de contacto de 15 minutos, luego enjuagar. La solución diluida permanece activa durante 24 horas.

Actividad	Microorganismos	Concentración de uso	Condiciones	Tiempo contacto
VIRUCIDA Contra virus con envoltura.	Contra virus con envoltura. (incl. HIV, HBV, HCV)	20 ml/l	sucio	15 min.
	Vaccinia Virus MVA	20 ml/l	sucio	15 min.
FUNGICIDA Y LEVITICIDA	A. Niger dsm1988	10 ml/l	sucio	5 min.
	C. Albicans dsm1386	10 ml/l	sucio	10 min.
BACTERICIDA	S. Aureus dsm799	20 ml/l	sucio	10 min.
	E. Coli dsm682	10 ml/l	sucio	10 min.
	B. Cereus dsm31	20 ml/l	sucio	10 min.
	B. subtilis	20 ml/l	sucio	10 min.
MICOBACTERICIDA (tuberculicida)	M. Terrae dsm43227	20 ml/l	sucio	10 min.

Actividad y espectro de acción

zero#500



Composición:

Cloruro de benzalconio 10 g,
O-fenilfenol, Tensioactivos
no iónicos, Antiespumantes,
Alcohol isopropílico,
Anticorrosivos, Agua
purificada hasta 100 g.

**CONCENTRADO A BASE
DE CLORURO DE
BENZALCONIO**

Envases:

ref. #500 botella de 1 l

ref. #501 garrafa de 5 l