

## DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES

**zero#701** es un desinfectante en spray listo para usar, destinado a la desinfección rápida, efectiva y de amplio espectro de las impresiones dentales contaminadas con material biológico potencialmente infectado con sangre y saliva.

### Modo de empleo:

Inmediatamente después de enjuagar la impresión con agua corriente, nebulizar uniformemente **zero#701** directamente sobre la impresión. Para una eficacia óptima, dejar actuar durante al menos 5 minutos.

| Actividad                              | Microorganismos                                  | Concentración de uso | Condiciones | Tiempo contacto |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------|
| VIRUCIDA<br>Contra virus con envoltura | Contra virus con envoltura (incl. HIV, HBV, HCV) | Listo para usar      | limpio      | 5 min.          |
|  |  | Listo para usar      | sucio       | 10 min.         |
|  | Vaccinia Virus MVA                               | Listo para usar      | limpio      | 5 min.          |
|  | Poliovirus type 1                                | Listo para usar      | sucio       | 10 min.         |
|  |  | Listo para usar      | limpio      | 5 min.          |
| FUNGICIDA Y LEVITICIDA                 | A. Niger dsm1988                                 | Listo para usar      | sucio       | 5 min.          |
|  | C. Albicans dsm1386                              | Listo para usar      | sucio       | 5 min.          |
| BACTERICIDA                            | S. Aureus dsm799                                 | Listo para usar      | sucio       | 5 min.          |
|  | E. Coli dsm682                                   | Listo para usar      | sucio       | 5 min.          |
|  | Salmonella ATCC 1331                             | Listo para usar      | sucio       | 5 min.          |
| MICOBACTERICIDA (tuberculicida)        | M. Terrae dsm43227                               | Listo para usar      | sucio       | 5 min.          |
|  | M. Avium DSM 44157                               |                      |             |                 |

Actividad y espectro de acción

# zero#701



**Composición:**  
Mezcla alcohólica (alcohol etílico e isopropílico) 30 g,  
O-fenilfenol, Cloruro de dimetildicetilamonio,  
Tensioactivos no iónicos,  
Secuestrantes, Agua purificada hasta 100 g.

**LISTO PARA USAR  
ESPECÍFICO PARA  
IMPRESIONES DENTALES**

Envase estándar  
ref. #701 botella de 750 ml