

DISINFEZIONE IMPRONTE

zero#701 è un disinfettante spray pronto all'uso destinato alla disinfezione rapida, efficace e ad ampio spettro delle impronte dentali contaminate da materiale biologico potenzialmente infetto con sangue e saliva.

Modalità di impiego:

Subito dopo aver sciacquato l'impronta con acqua corrente, nebulizzare uniformemente **zero#701** direttamente sull'impronta. Per un'efficacia ottimale lasciare agire per almeno 5 minuti.

Attività	Microrganismi	Concentrazione d'impiego	Condizioni	Tempi contatto
VIRUCIDA Su virus con mantello	virus con mantello (incl. HIV, HBV, HCV)	Pronto all'uso	Pulito	5 min.
	Vaccinia Virus MVA	Pronto all'uso	Sporco	10 min.
	Poliovirus type 1	Pronto all'uso	Pulito	5 min.
			Sporco	10 min.
FUNGICIDA E LIEVITICIDA	A. Niger dsm1988	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	C. Albicans dsm1386	Pronto all'uso	sporco	5 min.
BATTERICIDA	S. Aureus dsm799	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	E. Coli dsm682	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	Salmonella ATCC 1331	Pronto all'uso	sporco	5 min.
MICOBATTERICIDA (tubercolicida)	M. Terrae dsm43227	Pronto all'uso	sporco	5 min.
	M. Avium DSM 44157			

Attività e spettro di azione

zero#701



Composizione:
Miscela alcolica (alcol etilico e isopropilico) 30g -
O-Feinilfenolo -
Dimetildidecilammonio cloruro
- Tensioattivi non ionici -
Sequestranti - Acqua depurata a 100g.

**PRONTO USO
SPECIFICO PER
IMPRONTE DENTALI**

Confezione standard
ref. #701 flacone da 750 ml