


LIMPIEZA DE PORTA IMPRESIONES Y SIMILARES

zero#901 es un detergente en polvo concentrado, específico para eliminar residuos de alginato y yeso de los porta impresiones y similares. Usado correctamente, no daña las superficies de acero y no las opaca.


Modo de empleo:

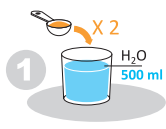

Se utiliza diluido en agua en una concentración del 10%: 2 dosificadores (50 g) por cada ½ litro de agua.



Disolver el polvo, preferiblemente en agua tibia, agitando durante al menos 30 segundos.

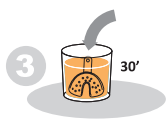

Sumergir los porta impresiones durante aproximadamente 30 minutos (el tiempo de permanencia depende de la cantidad de residuos a descomponer).



Luego, retirar y enjuagar bajo agua corriente.

zero#901 puede ser utilizado en un baño de ultrasonido con una reducción del 10% en los tiempos de inmersión.

zero#901

Composición:
Sales del ácido cítrico,
excipientes, colorantes y
aromas



Envase estándar
ref. #901 tarro de 1 kg con dosificador.