


## DETERSIONE PORTAIMPRONTA E SIMILARI

**zero#901** è un detergente in polvere concentrato, specifico per rimuovere residui di alginato e gesso dai portaimpronte e similari. Usato correttamente non danneggia le superfici in acciaio e non le opacizza.


### Modalità di impiego:

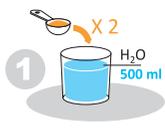

Si usa diluito in acqua in concentrazione del 10% - 2 misurini (50g) ogni ½ litro d'acqua.



Sciogliere la polvere, possibilmente con acqua tiepida, agitando per almeno 30'.

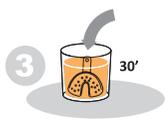

Immergere i portaimpronta per circa 30' (il tempo di permanenza dipende dalla quantità di residui da disgregare).



Quindi rimuovere e sciacquare sotto acqua corrente.

**zero#901** può essere utilizzato in vasca ad ultrasuoni con riduzione del 10% dei tempi di immersione.

# zero#901

**Composizione:**  
Sali dell'acido citrico,  
eccipienti, coloranti e aromi



Confezione standard  
ref. #901 barattolo da 1Kg con misurino