



## DIA FAST SETTING

Alginato libre de polvo, tiene una alta estabilidad dimensional y un rápido tiempo de fraguado.

### Descripción / Uso

Hidrocoloide irreversible de rápido fraguado. Material de impresión mucostático utilizado para modelos de diagnóstico, arcadas parcialmente edéntulas, prótesis parciales removibles, aparatos de ortodoncia, impresiones preliminares, antagonistas y cubetas de impresión individuales.

#### Envase estándar REF 3S1000

DIA Alginato de Impresión Dental Fast Set:  
1 bolsa de 453g

### Características

Alto poder gelificante,  
sinéresis reducida.  
Cremoso.  
Tiempo de fraguado rápido.  
Fragancia "todas las frutas".  
Libre de polvo.  
Rápida absorción de agua/  
polvo.

### Ventajas

Mayor estabilidad dimensional.  
No comprime los tejidos blandos.  
Comodidad para el paciente.  
Bien tolerado también por los niños.  
Polvos tratados para no dispersar micropartículas.  
Mezclado rápido y homogéneo.

#### DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	DIA FAST SETTING
Relación de dosificación polvo/agua	10g/17ml
Tiempo de mezcla manual	30"
Tiempo total de trabajo (ISO 1563)	1' 30"/2'
Tiempo en boca	1'
Ajuste de tiempo	2'30"

Los tiempos mencionados deben estar destinados a condiciones estándar de temperatura ambiente y temperatura del agua a 23°C.  
Las temperaturas más altas reducen los tiempos, las temperaturas más bajas los aumentan.