



## DIA FAST SETTING

Alginate exempt de poussière, avec une grande stabilité dimensionnelle et un temps de prise rapide.

### Description / Indications

Hydrocolloïde irréversible avec un temps de prise rapide. Matériau d'empreinte mucostatique utilisé pour les modèles de diagnostic, les arcs partiellement édentés, les prothèses partielles amovibles, les appareils orthodontiques, les empreintes préliminaires, les antagonistes et les porte-empreintes individuels.

#### Emballage Standard REF 3S1000

DIA Dental Impression Alginate Fast Set:  
1 x 453 g sachet

#### Emballage Standard REF 3S1002

1 DRY SAFE BOX boîte + 4 sachets (453 g)  
+ tasses à mesurer

### Caractéristiques

- Pouvoir gélifiant élevé, synérèse réduite.
- Crémeux.
- Temps de prise rapide.
- Parfum " tutti frutti " .
- Exempt de poussière.
- Absorption rapide de l'eau et de la poudre.

### Avantages

- Stabilité dimensionnelle supérieure.
- Ne compresse pas les tissus mous.
- Confort pour le patient.
- Bien toléré également par les enfants.
- Poudres traitées pour ne pas disperser les microparticules.
- Mélange rapide et homogène.

DONNÉES TECHNIQUES	DIA FAST SETTING
Rapport de dosage poudre/eau	10g/17ml
Temps de mélange manuel	30"
Temps de travail total (ISO 1563)	1' 30"/2'
Temps en bouche	1'
Temps de prise	2'30"

Les temps mentionnés doivent être destinés aux conditions standards de température ambiante et de température de l'eau à 23°C.  
Des températures plus élevées réduisent les temps, des températures plus basses augmentent les temps.