



vestige

LIGHT-FAST

Matériau d'impression à faible viscosité, indiqué aussi bien dans la technique d'empreinte double que dans la technique simultanée. Précis dans la détection des détails, il pénètre dans le sulcus et s'adapte aux préparations grâce à la combinaison parfaite de fluidité, d'hydrocompatibilité et de thixotropie. Il présente des propriétés mécaniques supérieures en termes de résistance à la déchirure.

Description / Indications

Polysiloxane vinyle de consistance légère pour la prise d'empreintes en prothèses fixes, indiqué pour les bridges, les couronnes, les inlays, les onlays, les prothèses combinées, l'implantologie. À utiliser en combinaison avec VESTIGE PUTTY ou VESTIGE TRAY MATERIAL. Numérisable. Couleur bleue. Temps de prise rapide (Fast Setting).

Kit Standard REF: 1S2000

VESTIGE LIGHT-FAST:
2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange.

Kit Standard REF: 1S2001

VESTIGE LIGHT-FAST PACK ECO:
4 cartouches 50 ml

Caractéristiques

- Thixotrope
- Processus et temps de durcissement appropriés
- Comportamiento hidrofílico.
- Stabilité dimensionnelle.
- Désinfectable.
- Numérisable.

Avantages

- Haute fluidité sans couler.
- Adapté aux techniques d'empreinte en deux phases.
- Précision même en présence d'humidité résiduelle. Fidèles et sans changements dans le temps.
- Sécurité pour le dentiste.
- Compatible avec tous les systèmes CAD/CAM.

DONNÉES TECHNIQUES	VESTIGE LIGHT-FAST
ISO4823 / ADA spec. 19	Type 3 LIGHT bodied consistency
Proportion de mélange	1:1
Temps de mélange (23°C)	Automix
Temps total de traitement (23°C)	1'30"
Temps en cavité buccale (35°C)	2'30"
Temps de durcissement (35°C)	4'
Dureté	45 Shore "A"
Variation dimensionnelle linéaire	< 0.20%
Récupération élastique	> 99.5%