



vestige

LIGHT-NORMAL

Matériau d'impression à faible viscosité, indiqué à la fois dans la technique d'empreinte double et dans la technique simultanée. Précis dans la détection des détails, pénètre dans le sulcus et s'adapte aux préparations grâce à la combinaison parfaite de fluidité, d'hydrocompatibilité et de thixotropie. Il possède des propriétés mécaniques supérieures en termes de résistance à la déchirure.

Description / Indications

Polysiloxane vinyle de consistance légère pour la prise d'empreintes en prothèses fixes, indiqué pour les bridges, les couronnes, les inlays, les onlays, les prothèses combinées, l'implantologie. À utiliser en combinaison avec VESTIGE PUTTY ou VESTIGE TRAY MATERIAL. Numérisable. Couleur bleu. Temps de prise normal (Regular Setting).

Kit Standard REF:1S2100

VESTIGE LIGHT-NORMAL:
2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange.

Caractéristiques

- Thixotrope
- Processus et temps de durcissement appropriés.
- Comportement hydrophile.
- Stabilité dimensionnelle.
- Désinfectable.
- Numérisable.

Avantages

- Haute fluidité sans couler.
- Adapté aux techniques d'impression simultanée.
- Précision même en présence d'humidité résiduelle.
- Fidèles et sans changements dans le temps.
- Sécurité pour le dentiste.
- Compatible avec tous les systèmes CAD/CAM

DONNÉES TECHNIQUES	VESTIGE LIGHT-NORMAL
ISO4823 / ADA spec.19	Type 3 light bodied consistency
Proportion de mélange	1:1
Temps de mélange (23°C)	Automix
Temps total de traitement (23°C)	2'
Temps en cavité buccale (35°C)	3
Temps de durcissement (35°C)	5'
Dureté	45 Shore "A"
Variation dimensionnelle linéaire	< 0.20%
Récupération élastique	> 99.5%