



# vestige

## PUTTY ADMIX

C'est un silicone d'addition pour les mélangeurs automatiques. Compatible avec tous les systèmes de mélange dynamique 5:1, VESTIGE putty ADmix est une alternative à la pâte traditionnelle et peut être utilisé avec tous les fluides de correction d'addition dans différentes techniques d'empreinte.

### Description / Indications

Polysiloxane vinyle pour la prise d'empreintes en prothèses fixes, indiqué pour les bridges, les couronnes, les inlays, les onlays, les prothèses partielles, l'implantologie, les empreintes de position et les empreintes pour temporaires. Dureté finale équilibrée pour permettre une facile extraction de la cavité buccale même en présence de coupures marquées. Numérisable. Couleur violet.

#### Kit Standard REF: 1S7001

VESTIGE PUTTY ADmix:  
2 x 380 ml + 10 mélangeurs dynamiques  
+ 1 anneau de fixation.

### Caractéristiques

- Mélange toujours homogène.
- Consistance idéale.
- Processus et temps de durcissement appropriés.
- Dureté finale équilibrée.
- Stabilité dimensionnelle.
- Désinfectable.
- Numérisable.

### Avantages

- Absence total de bulles ou d'imperfections.
- No muco-compressif.
- Adapté aux techniques d'empreinte en une ou deux phases.
- Facile à retirer de la cavité buccale.
- Fidèles et sans changements dans le temps.
- Sécurité pour le dentiste.
- Compatible avec tous les systèmes CAD/CAM.

DONNÉES TECHNIQUES	VESTIGE PUTTY ADmix
ISO4823 / ADA spec. 19	Type 0 putty consistency
Proportion de mélange	5 1
Temps de mélange (23°C)	Automix
Temps total de traitement (23°C)	1'30"
Temps en cavité buccale (35°C)	3
Temps de durcissement (35°C)	4' 30"
Dureté	64 Shore "A"
Variation dimensionnelle linéaire	< 0.20%
Récupération élastique	> 99.5%