



vestige

LIGHT-FAST

Materiale per impronte a bassa viscosità, indicato sia nella tecnica della doppia impronta che nella tecnica simultanea. Preciso nel rilevare il dettaglio, penetra nel solco e si adatta alle preparazioni in virtù della perfetta combinazione tra fluidità, idrocompatibilità e tissotropia. Presenta superiori proprietà meccaniche in termini di resistenza alla lacerazione.

Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza light per la presa d'impronta in protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi combinata, implantologia. Da utilizzare in combinazione con VESTIGE PUTTY o VESTIGE TRAY MATERIAL. Scansionabile. Colore blu. Tempo di indurimento rapido (Fast Setting).

Confezionamento standard REF 1S2000

VESTIGE LIGHT-FAST: 2 cartucce 50ml + 12 puntali di miscelazione

Confezionamento standard REF 1S2001

VESTIGE LIGHT-FAST ECO PACK: 4 cartucce 50ml

Caratteristiche

- Tissotropico
- Tempi adeguati di lavorazione e indurimento
- Comportamento idrofilo
- Stabile dimensionalmente
- Disinfettabile
- Scansionabile

Vantaggi

- Elevata scorrevolezza senza colare
- Indicato per le tecniche di impronta a due fasi
- Precisione anche in presenza di umidità residua
- Impronta fedele e inalterata nel tempo
- Sicurezza per il dentista
- Compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM

DATI TECNICI	VESTIGE LIGHT-FAST
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 3 light bodied consistency
Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di miscelazione (23°C)	Automix
Tempo totale di lavorazione (23°C)	1'30"
Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C)	2'30"
Tempo di indurimento (35°C)	4'
Durezza	45±2 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	> 99,5%